



SilverPlug[®]

עלון מידע למטופל



SilverPlug®
SILVERAID
TOTAL IMPLANT CARE




SilverPlug®

שיטה חדשה לשמור על
בריאות של השתלות השיניים

שתלים דנטליים, ככלל, בנויים משני מרכיבים:
שתל טיטניום הוחדר לתוך העצם והמבנה
שמורכב על השתל.
החיבור בין שני הרכיבים מאובטח באמצעות
בורג. ניתן להרכיב כתרים או גשרים על גבי
המבנים עם דבק מיוחד או בעזרת אתו בורג
חיבור.

בשני המקרים, יש צורך למלא את פיר הברגה
לאחר הסגירה בחומר איטום – ולהסתיר את
פתח הגישה עם חומר יעודי או קומפוזיט
תואם לצבע שן.

סילברפלאג הוא המוצר הרפואי בעל פטנט
עולמי ורישום אירופאי ואמריקאי, המיועד
לאיטום פיר הברגה של המבנה. הוא עשוי
פולימר המכיל זאולית כסף, חומר טבעי
הידוע ביכולות האנטי בקטריאלית שלו.
יעילות המובטחת על ידי מחקרים קליניים
עוזרת להפחתת זיהום וחידקים בתוך
השתל, משמרת את קו חניכיים שסביבו,
מונעת תהליכים דלקתיים ומסייעת בהורדת
הסיכון לפרי-אימפלנטיטיס.

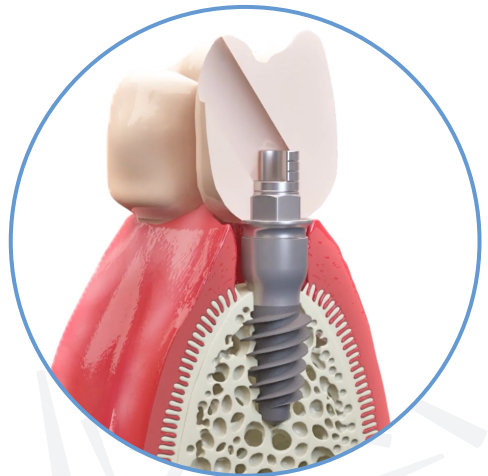



בריאות השתל

מחקרים רבים קבעו כי בכל מערכות שתלים קיים רווח זעיר בין שתל למבנה של הכתר בצורה כזאת או אחרת.

כאשר מופעל עומס על השתלים, למשל בלעיסה, הם נאלצים להתמודד עם תנועות מיקרו-מכניות. בזמן זה, נוצר אפקט של פומפה, השואב רוק מהפה אל תוך השתל. אותו אפקט שאיבה גורם לחיידקים לזרום פנימה: חיידקים אירוביים מתים, בעוד חיידקים אנאירוביים שורדים ומתחילים להתרבות.

כון להיום, חל' מרופאי שיניים עדיין מחפשים פתרון לבעיה של איטום פתח כניסה בשתל עם חומרי מילוי מסוגים רבים: צמנט זמני, טפולון של אינסטלטורים, צמר גפן, גוטה-פרקה, שעווה – וזו היא רק רשימה חלקית. חומרים הללו אינם הוסמכו לאיטום שתלים וחלקם אף לא מאושר כלל לשימוש הדנטלי.

ללא טיפול בתופעה, החיידקים מצטברים בתוך השתל. טמפרטורה, תזונה ותנאים אנאירוביים בפיר כניסה הפנימי, יוצרים סביבה אידאלית לשגשוג של מיקרואורגניזמים מזיקים. במצב הנוכחי, עם כל השתלה שבוצעה, עלולות להופיע התופעות הבאות, בעוצמה בדרגות שונות: דימומים ודלקות כרוניות, ריח רע, נסיגת חניכיים, ספיגת עצם סביב ראש וצוואר השתל וכתוצאה – פרי-אימפלנטיטיס.

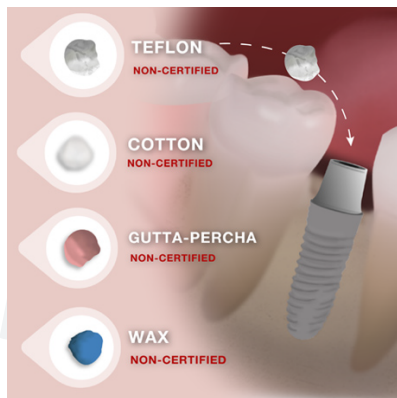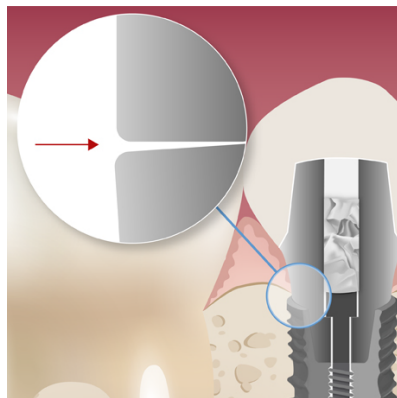


מה זה פרי-אימפלנטיס?

מעל ל-20% מהשתלים כיום, כבר נגועים בפרי-אימפלנטיס. ב-80% של השתלים "הבריאים" נצפו סימנים של מוקוזיטיס: חניכיים אדומות ומדממות סביב השתל כתגובת הגוף לנוכחות הבקטריות. נתון מדאיג זה, משולב בחוסר שמירה ואי-הקפדה על היגיינת הפה, מעלה סיכוי לפרי-אימפלנטיס

על פי הנתונים הסטטיסטיים, במהלך 7 שנים הראשונות של ההשתלה, כל שתל החמישי נפגע מפרי-אימפלנטיס. זה עלול לגרום זנק בריאותי (עצם וחניכיים) וכספי (ניתוחי שיקום העצם יקרים או אובדן סופי של השתלים).

23%

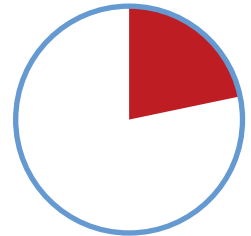

מתוך כלל השתלים
נפגעו כתוצאה
מפרי-אימפלנטיס




למה silver

איך פועל זיאוליט הכסף

יון הכסף (+Ag) הוא חומר אנטי-בקטריאלי טבעי ומכיל שפע יתרונות בשל אופיו הייחודי. השימוש בו עתיק יומין, ידוע כבר במשך אלפי שנים ולא קיימות התוויות נגד המתייחסות אליו. ולכן ממצרים עתיקים 4000 לפני הספירה עד לסוכנות לחלל האמריקאית נאס"א במערכות טיהור מים בחלליות - תוכלו למצוא עדויות לסגולות של החומר לאורך כל ההיסטוריה.

מקלוי סילברפלאג מורכבים מחומר קומפוזיטי במילוי זאוליט כסף (נתרן אלומינוסיליקט) הנשא את יון הכסף, +Ag. הזאוליט הוא מינרל טבעי עם נקוביות מזעריות בחלקו הפנימי, אליהן יוני הכסף מוחדרים. הם קשורים באורביטות נמוכות - לא משתחררים לגוף, אך מוכנים לתקוף את החיידקים המאיימים על בריאות השתל.

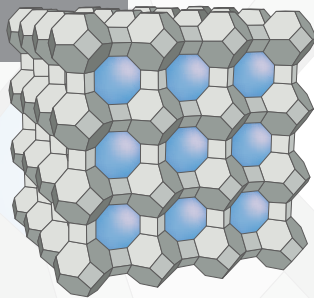

מבנה ננו-נקבי
של זאוליט כסף

מה זה SilverPlug®?

המוצר הרפואי שפותח באיטליה ומאושר לשימוש ע"י איחוד האירופאי, FDA האמריקאי ומשרד הבריאות הישראלי למטרת איטום מבנים במערכות שיקום על גבי שתלים מכל הסוגים. סילברפלאג שומר על הנוכחות הקבועה של יונים באזור ההשתלה, מבלי לשחרר אותם אל הגוף. החומר נשאר פעיל במשך לפחות 24 חודשים. הוא אוטם את האזור באופן מוחלט ועוזר למטופלים ולרופאים השיניים באתגר היומיומי – מניעת זיהומים, דלקות, ופרי-אימפלנטיטיס.



אם כבר
יש לכם שתלים
ואתם מעוניינים
להחליף חומר
מילוי מאולטר
בתוך השיקום
שלכם – פנו
לרופא שיניים
שלכם, שדרוג
לסילברפלאג
תמיד אפשרי

שאלו את הרופא שלכם על

SilverPlug®



השתלת שיניים – זה טיפול ארוך ויקר.
בעזרת **סילברפלאג**, ניתן להפחית את
הסיכון לדלקות באזור ההשתלה.

למה **SilverPlug**[®] ?

השימוש בו פשוט, לא גוזל זמן ונותן
השפעה ארוכת-טווח על בריאות ושלמות
של השתלים שלכם.
הוא מכחית את הסיכון להתפרצות של
מחלות פרי-אימפלנטיות ועוזר לכם לשמור
על החיוך הבריא לכל החיים.



למה כדאי לשלם ל- **SilverPlug**[®] ?

SilverPlug הוא השקעה כספית
קטנה וחכמה מאוד, התורמת באופן
פעיל להצלחה ארוכת הטווח של
השתלת השיניים.

**אל תפספסו את החידוש הזה
שעושה את ההבדל!**



1
2
3
4
5


אתם כבר משלמים על טיפול תקופתי
אצל שיננית, למה שלא תשקיעו
בהגנה על השתל הדנטלי מפני הגורם
העיקרי לפרי-אימפלנטיטיס?

האם הייתם קונים רכב ללא מנגנוני
בטיחות בסיסיים כמו ABS או כריות
אוויר? אז למה לקחת את הסיכון על
השתלות השיניים שלכם?

SilverPlug הוא מכשיר רפואי רשום
ומוגן פטנטים בכל העולם, שפותח
ממחקר ונסיון מעשי של מובילי דעה
מאיטליה ואיחוד האירופי.

SilverPlug מתאים את עצמו לכל
צורה וגודל פיר הברגה של כל מותג
שתלים בשוק.

בקשו מרופא השיניים שלכם להוסיף
את סילברפלאג בעת ההשתלה או
במסגרת פרוטוקול תחזוקת השתל.

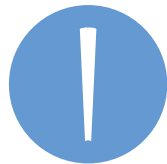

SilverPlug®
 **SILVERAID**
TOTAL IMPLANT CARE



חותמת מקורית



silverplug.co.il

אזהרה: SILVERPUG מיועד לשימוש רק על ידי צוות רפואי.